

روش ارسال BacTec به بیمارستان نمازی

۱- فرم BacTec (ظرف یا ویال) توسط بخش پر شده به آزمایشگاه ارسال می شود. در سیستم تقاضای ویال وارد می شود.

۲- ظرف BacTec که در یخچال بیوشیمی است به همراه فرم مخصوص BacTec (در کشو بخش بیوشیمی) به بخش مربوطه فرستاده می شود .

۴- پرسنل آزمایشگاه قبل از فرستادن ویال BacTec به بخش با مسئول بخش هماهنگ کند که قبل از خونگیری برگه تقبل هزینه BacTec توسط بخش آماده شود و در سیستم HIS هم تقاضا شود و راننده حتماً آماده بردن خون باشد سپس خونگیری انجام شود و سریعاً تحویل راننده شود و به بیمارستان نمازی ارسال شود.

پرسنل بخش بیوشیمی در دفتر مخصوص نمونه های ارسالی مشخصات بیمار را وارد میکند و در سیستم HIS ، Blood culture و BacTec vial پذیرش می کند.

توجه: BacTec تا نیم ساعت بعداز خونگیری باید به بیمارستان نمازی تحویل داده شود .

تهیه کننده مسئول کنترل کیفی: ویدا صمیمی ۹۹/۰۷/۰۱

بازنگری ۱۴۰۰/۰۹/۱

تایید کننده : علی سعادت فر

مسئول فنی: دکتر سیمین ترابی نژاد